

# ViziLite<sup>®</sup> Plus i TBlue – krok po kroku

ViziLite<sup>®</sup> Plus pomaga zobaczyć to, czego oko nie widzi

ViziLite<sup>Plus</sup>  
ORAL LESION IDENTIFICATION AND MARKING SYSTEM  
with TBLUE

P<sup>o</sup>ldent<sup>®</sup>

# ViziLite® Plus i TBlue – krok po kroku

**Badania przesiewowe wspomagające wykrywanie patologicznych stanów jamy ustnej, w tym stanów rakowych i przedrakowych z wykorzystaniem testu ViziLite® Plus i znacznika TBlue**




1. Zachęcaj pacjentów do czytania ulotki ViziLite® Plus w poczekalni oraz wyrażania zgody na przeprowadzenie badania. Podpisaną zgodę pacjenta (załączoną razem z ViziLite®) umieszczaj w kartotece pacjenta.

2. Przeprowadź standardowe badanie jamy ustnej, odnotowując obecność jakichkolwiek zmian chorobowych na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.



3. Poproś pacjenta, by płukał jamę ustną roztworem ViziLite® Pre-Rinse (1% roztwór kwasu octowego) przez 30-60 sekund.

4. Zegnij elastyczną powłokę latarki, tak, by zgnieść wewnętrzną fioletkę.

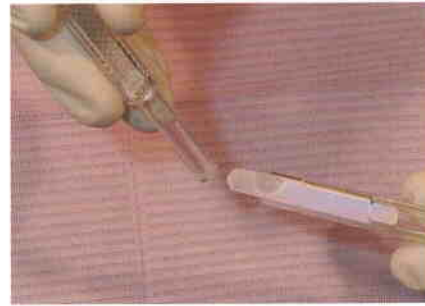

5. Mocno potrząśnij latarką, tak, by dokładnie wymieszać składniki latarki. Następnie, od strony otwartego końca, włóż latarkę do retraktora i umocuj ją.

6. Przygaś światło w gabinecie lub zacięń miejsce, w którym znajduje się osoba badana. Jeśli nie istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła w gabinecie, możesz założyć specjalne okulary ViziLite, ułatwiające przeprowadzenie badania.



7. Zbadaj jamę ustną z zastosowaniem urządzenia ViziLite®. Otwarte okienko retraktora powinno być skierowane w stronę badanego miejsca.



8. Odszukaj i opisz jakiegokolwiek zmiany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej. Dokumentację prowadź na mapie jamy ustnej obecnej na odwrocie formularza zgody pacjenta. Wprowadź barwnik TBlue na powierzchnię zmian widzianych w świetle ViziLite. Gaziki należy stosować w stosownej kolejności: 1, 2 i 3, zgodnie z oznaczeniem opakowania.



9. Zmiany wybarwione TBlue są widoczne nawet bez używania światła emitowanego przez urządzenie ViziLite. Można teraz wykonać fotografie wewnętrzne, które należy włączyć do kartoteki pacjenta lub przekazać specjalście wraz ze skierowaniem.

## Coroczne badania z zastosowaniem ViziLite® Plus to nowy standard opieki stomatologicznej

Coroczne badania przy pomocy wzroku i dotyku na obecność zmian patologicznych jamy ustnej u pacjentów, szczególnie pacjentów z grup ryzyka, są standardem wymaganym przez Stowarzyszenia Lekarzy Dentystów w USA i w niektórych krajach Unii Europejskiej.

**Poldent sp. z o.o.**

Al. Jana Pawła II 80, lokal VI, 00-175 Warszawa  
Tel: 022 351 7 650 do 655, Fax: 022 351 7 679  
poldent@poldent.pl, www.poldent.pl

ViziLite® Plus  
ORAL LESION IDENTIFICATION AND MAPPING SYSTEM  
TBLUE

**Poldent®**